

Notice

Ce masque réutilisable est considéré comme un masque barrière grand public. Suivez les précautions d'usage.

Nous vous invitons à respecter les gestes barrières et la distanciation sociale recommandés par le gouvernement.

Aucun masque ne protège à 100%, ne vous sentez pas en totale sécurité avec un masque quel qu'il soit.


Ce masque sort de notre usine, produit par des bénévoles et présente quelques petits défauts sur son aspect esthétique seulement.

Utilisation | Précautions d'usage

Placez le masque sur votre visage en positionnant l'élastique derrière votre tête. Pincez la barrette métallique pour l'adapter à votre visage.

Ce masque est lavable à la lingette désinfectante ou à l'eau mais ne doit jamais être chauffé, il ne doit pas rester dans les endroits chauds (comme dans une voiture en plein soleil, par exemple).

Nous recommandons de changer le filtre toutes les 4 heures en usage intensif ou à chaque sortie. Pour cela il suffit de dévisser les deux filtres. Désinfectez chaque pièce à l'aide d'une lingette ou de l'eau savonneuse et rincez bien. Jetez le coton et remplacez-le par un nouveau. Vous pouvez utiliser du coton hydrophile démaquillant ou un sac aspirateur. Il suffit de couper un disque correspondant à la taille nécessaire et de l'insérer dans chaque filtre sans trop le presser. Puis revissez les filtres en serrant jusqu'au contact sans trop forcer.

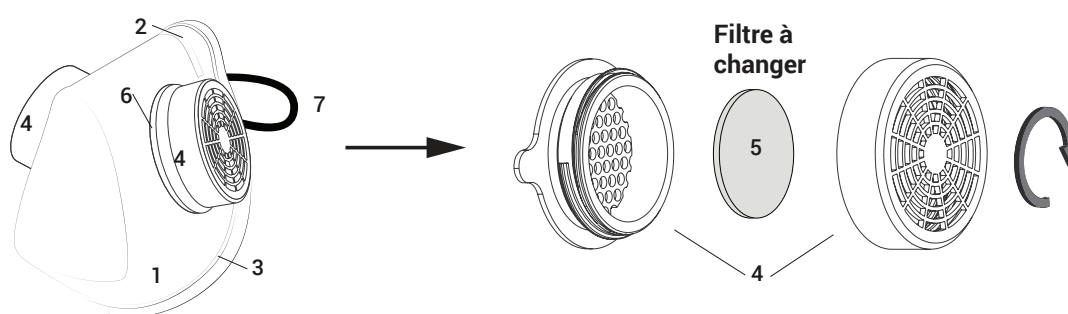

- 1 Feuille de polyamide** hermétique et sublimée avec un de nos motifs.
- 2 Barrette métallique** permettant d'ajuster le masque à votre visage.
- 3 Joint en caoutchouc** pour le confort au contact de votre visage.
- 4 Cartouches** imprimées en 3D, constituées de 2 parties qui se vissent ensemble.
- 5 Filtre** en coton hydrophile démaquillant ou sac aspirateur.
- 6 Joint** qui permet d'hermétiser l'ensemble cartouche + feuille de polyamide.
- 7 Elastique** pour le bon maintien sur votre tête.

Plus d'informations sur
www.fabriqueduski.com